

**Инструкция по применению**  
**Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения**  
**«D200 TEMP» (D200 TEMP), набор в коробке**

Однокомпонентный светоотверждаемый материал для временного пломбирования.

**Комплектация**

1. Материал пломбировочный «D200 TEMP» (D200 TEMP) в шприце, 4г - 2шт.;
2. Инструкция по применению - 1 шт.;

**Состав**

Полиметилакрилаты, стеклонаполнитель, фториды, кремний, полимерный порошок, катализатор, стабилизаторы.

**Показания к применению**

- временные пломбы всех видов
  - временная защита при изготовлении вкладок и накладок
  - временная герметизация полостей на этапах эндодонтического лечения
  - перебазировка временных коронок и мостовидных протезов из поликарбоната или метакрилата
- После отверждения материал остается эластичным и таким образом, делает его удаление простым и быстрым даже при наличии небольших поднутрений.

**Противопоказания**

Аллергии на акриловые смолы, которые есть в составе «D200 TEMP», могут быть противопоказанием к использованию этого материала.  
Непригоден в качестве единственного материала для изготовления коронок и мостовидных протезов.

**Побочные эффекты**

- Может вызвать реакцию у пациентов с повышенной чувствительностью к любому из ингредиентов. В этом случае не рекомендуется использовать материал.

**Несовместимость с другими материалами**

Фенольные вещества подавляют полимеризацию «D200 TEMP». Цементы с оксидом цинка, содержащие эвгенол нельзя использовать вместе с «D200 TEMP».

**Подготовка зуба и нанесение материала «D200 TEMP»**

Высушите зуб для временного пломбирования, при необходимости используйте матрицу. Очистите полость струей воды и высушите её. Поместите достаточное количество «D200 TEMP» в полость при помощи шпателя или другого подходящего инструмента. Восстановите контур, удаляя излишки материала. Если «D200 TEMP» прилипает к инструменту, слегка смочите инструмент адгезивом светового отверждения.

**Отверждение и удаление после использования**

Светоотверждайте в течение 40 секунд при помощи полимеризационной лампы с интенсивностью

излучаемого света не менее 1000 мВт/см<sup>2</sup> и длиной волны 400-500 нм (синий цвет). При необходимости можно проводить светоотверждение более крупных реставраций по 40 секунд на секцию. Допустимая толщина слоя для полимеризации до 5 мм. Удалите матрицу. Проверьте окклюзию. Для удаления временной пломбы «D200 TEMP» после использования вставьте в неё прочный инструмент и извлеките материал.

**Важная информация:**

- «D200 TEMP» обычно остается на месте в процессе стандартной техники изготовления вкладок. В случае, если механического сцепления недостаточно, то «D200 TEMP» может быть цементирован материалом, не содержащим эвгенол. Если «D200 TEMP» применяется к поднутрениям проксимального отдела, сцепление может быть усилено. В этом случае, перед нанесением «D200 TEMP», используйте не матрицу, а деревянный межзубный клин.
- Если в процессе реставрации использовалась светоотверждаемая основа или лайнерная прокладка, то во избежание связки сними «D200 TEMP» изолируйте их вазелином или другой разделяющей средой.
- «D200 TEMP» можно обработать гибкими шлифовальными дисками или твердосплавными борами и отполировать с помощью полировок из силикона. Избыток также можно удалить скальпелем.
- С целью повышения стабильности временной пломбы для окклюзионных участков может использоваться постоянный светоотверждаемый композит. Светоотверждение «D200 TEMP» допускается как отдельно так и вместе с постоянным пломбировочным материалом.

**Транспортирование**

Всеми видами крытого транспорта при температуре не более 25°C.

**Условия хранения**

Открытую упаковку хранить при температуре не выше 25 °C (77 °F).

Беречь от прямых солнечных лучей. Не использовать после истечения срока годности. Беречь от влаги.

**Срок годности**

Срок годности материала пломбировочного «D200 TEMP» 3 года. Не использовать после истечения срока годности.

**Утилизация**

Утилизация согласно правила ЛПУ для безопасных медицинских отходов класса А.

**Гарантии производителя**

Fisrt Scientific Dental GmbH гарантирует, что данное изделие отвечает требованиям всех опубликованных

спецификаций, при условии соблюдения условий хранения, транспортировки и использования.

В случае возникновения подозрений относительно качества данного медицинского изделия необходимо связаться с производителем или уполномоченным представителем производителя.

#### **Ограничение ответственности**

First Scientific Dental GmbH не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате ненадлежащего использования данного изделия.

**Беречь от детей!**

**Только для стоматологического использования!**

#### **Расшифровка символов, указанных на упаковке**



Номер партии



Использовать до указанной даты



Номер партии



Ограничение температуры



Обратитесь к инструкции по применению



Не допускать воздействия солнечного света



Беречь от влаги



**Производитель:**  
**First Scientific Dental GmbH**  
**Robert-Bosch-Strasse 26**  
**25335 Elmshorn, Germany**

**Уполномоченный представитель производителя –**  
**Дистрибьютор:**

Общество с ограниченной ответственностью «Ред Стар Опт» (ООО «Ред Стар Опт»)  
Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7, литера А, помещение 37Н  
Телефон: +7(812) 642-14-01  
E-mail: redstar.opt@bk.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17929 от 08.08.2022 г.